

Notice d'utilisation du kit de prise d'empreinte

- 1) Brosse-toi les dents et marque ton nom ici :
- 2) Choisis le porte empreinte à ta taille (tes dents du fond ne doivent pas toucher les bords extérieurs).
- 3) Mélange UNE capsule « CATALYST » avec UNE capsule « BASE » activement dans tes mains pendant 20 secondes maximum (jusqu'à obtenir une couleur homogène).
- 4) Roule la pâte obtenue et place-la rapidement au fond du porte-empreinte comme ci-dessous :



- 5) Place le tout en bouche et mords fermement jusqu'au plastic.
- 6) Passe ta lèvre par-dessus le plastic et appuie sur tes joues et tes lèvres afin de faire monter la pâte le plus haut possible sur tes gencives.



*Nous avons besoin de tes dents ET d'un maximum d'hauteur de gencive

- 7) Attends 2 minutes sans bouger avant de retirer l'empreinte de ta bouche.
- 8) Envoie-nous une photo de ton empreinte sur Instagram, ou par texto, ou par mail pour validation (contact@occlusal.fr ou 06.58.01.85.14)
INUTILE DE L'ENVOYER SUR PLUSIEURS CONVERSATIONS 😊
- 9) Si nous la validons, LAISSE-LA SUR LE SUPPORT, et remets-la dans le sachet avec les deux pâtes non utilisées. Sinon, nous te demanderons d'effectuer un deuxième essai avec les deux pâtes restantes et nos conseils.
- 10) Pour finir, renvoie le colis ainsi que le matériel non utilisé à l'adresse suivante dans une enveloppe à bulles trouvable dans ton bureau de poste :